

Інструкція з використання вапорайзера AroMed Vaporizer 4.0




AROMED HQ

Перші кроки до оздоровлення

Підготовка вапорайзера AROMED HQ до використання

- Вимийте водяний фільтр (1) та заповніть його водою на 1 сантиметр.
Приєднайте силіконову трубку та мундштук.
- Пристебніть водяний фільтр за допомогою гумової стрічки (2). Не розлийте воду!
- Наповніть ємність для субстанції (3) потрібною вам субстанцією.
Переконайтеся, що між субстанцією та захисним склом нагрівального елемента (4) є відстань принаймні 5 міліметрів.
- Тепер за допомогою гнучкого штатива (5), введіть нагрівальний елемент (4) ємність для субстанції. Беріться за нагріваючий елемент лише вище паза. Натисніть на нагрівальний елемент, щоб він щільно увійшов у ємність для субстанції
- Увімкніть ВАПОРАЙЗЕР AROMED HQ в мережу (необхідна напруга 90-250 В, 50-60 Гц) за допомогою кабелю живлення (6).
- На дисплеї (7) має відобразитися напис «standby» (“ ”).

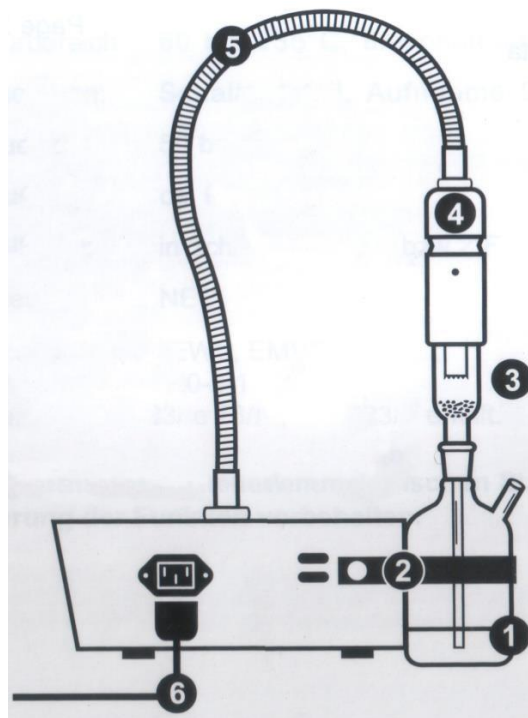


Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Випарювання

- Натисніть червону кнопку (8) на передній панелі. Виберіть бажану температуру випаровування за допомогою кнопок + (9) та – (10). Для вибору оптимальної температури дивіться список рослин.
- Під час нагрівання у лівому верхньому куті дисплея світиться червона точка. Коли червона точка почне блимати, це означає, що система нагрілася до встановленої температури. Ви можете починати плавно та глибоко вдихати випаровування. Під час дихання червона точка на дисплеї повинна блимати. Якщо ви дуже різко вдихнете, червона точка загориться рівним світлом.
- Спостерігайте за субстанцією: якщо вона стане темно-коричневою, це означає, що температура однозначно дуже висока, змініть її, натискаючи кнопку «–».
- Щоб вимкнути вапорайзер AROMED HQ, натисніть червону кнопку. Остання використана вами температура збережеться у пам'яті та буде використана при повторному включенні вапорайзера.
- Ми рекомендуємо вам чистити силіконову трубку, водяний фільтр і мундштук у киплячій воді або дезінфікуючим розчині після кожного використання.

Відключайте кабель живлення від пристрою, якщо ви не користуєтеся ним!

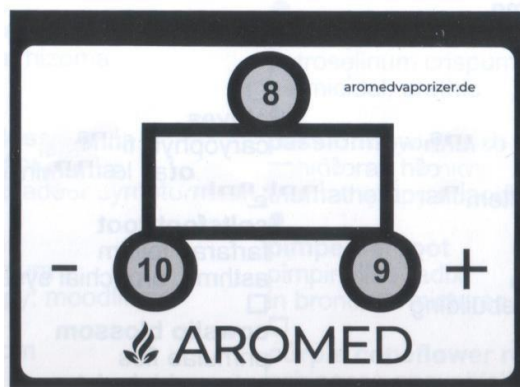

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Список рослин

Не випаровуйте субстанції і не вдихайте випаровування субстанцій, які ви не знаєте без консультації лікаря чи фармацевта!

Загалом, будь-який трав'яний чай чи лікарську рослину можна використовувати з вапорайзером AROMED HQ.

Для посилення ефекту можна (і це смачно) пити воду з водяного фільтра, оскільки в ній залишаються активні компоненти після фільтрації випарів.

Гомеопатичні рідини та настоянки традиційної китайської медицини можна випаровувати та вдихати за допомогою додаткової скляної ємності для рідин (див. розділ Аксесуари). Поцікавтеся у ароматерапевта на рахунок лікарських рослин, які задовольнять ваші запити.

Для того, щоб зі списком рослин було легше розібратися, температури випаровування активних компонентів розділені на три категорії. Якщо субстанція дуже суха або дуже подрібнена, вам може знадобитися встановити температуру нижче вказаної.

- Температура випарювання до 130 градусів Цельсія
- Температура випарювання до 190 градусів Цельсія
- Температура випарювання до 235 градусів Цельсія

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Народна назва

Наукова назва

Медицинське застосування

- **Анис**

Anisi fractus

Бронхіальна система

- **Волошка**

Basilici herba

Астма, накопичення слизу

- **Базилік**

The nigra folium

Загальнозміцнюючий

- **Мати-й-мачуха**

Matricariae flos

Запалення, бронхи

- **Гвоздика**

Caryophylli flos

Бактерицид, місцеве знеболююче

- **Першоцвіт**

Primulae flos

Бронхіальні мікстури

- **Евкаліпт**

Eucalypti folium

Дезинфектор, бактерицид, відхаркувальний засіб

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

- **Гіркий фенхель**
Foeniculi Amari fructus
Бронхіальні мікстури
- **Гінкго**
Ginko folium
Судинорозширююче, тонізуюче
- **Гуарана**
Guarana herba
Загальнозміцнююче
- **Хміль**
Lupuli strobulus
Седативне, стреси
- **Шишки хмілью**
Lupuli glandula
Снодійне
- **Плющ**
Hederae herba
Седативне
- **Кава-кава**
Kava-kava rhizome
Загальнозміцнююче
- **Лаванда**
Lavendulae flos
Стрес, проблеми з жовчним міхуром
- **Шкірка лимона**
Citri pericarpium
Ароматерапія, підвищення настрою

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

- **Квітки лайму**
Tiliae flos
Бронхіальна система
- **Корінь солодки**
Liquiritae radix
Бронхіальна система
- **Медунка**
Pulmonariae herba
Бронхіальна система
- **Корінь алтею**
Althaeaea radix
Бронхіальна система
- **Мате**
Mate folium
Загальнозміцнюючий
- **Меліса**
Melissa spp.
Спазмолітик
- **Перцева м'ята**
Mentha piperita
Болюча менструація, секреція жовчного міхура
- **Померанець**
Aurantium spp.
Ароматерапія, підвищення настрою
- **Петрушка**
Petroselinum crispum
Бактерицид, сечогінне

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

- **Пасифлора**
Passiflorae herba
Ароматерапія, підвищення натрою
- **Корень бедрцю**
Pimpinellae radix
Бронхіальні мікстури
- **Ехінацея пурпурна**
Echinacea angustifoliae radix
Укріплення імунної системи
- **Квебрахо**
Quebracho bark
Відхаркувальне
- **Корінь раувольфії**
Rauwolfiae radix
Понижує тиск
- **Подорожник**
Plantaginis lanceolatae folium
- **Шавлія**
Salvia officinale
Антипреспірант, спазмолітик
- **Шавлія пурпурна**
Salvia sclarea
Спазмолітик, болюча менструація
- **Звіробій**
Hyperici herba
Застопійливе, антидепресант

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

- **Тім'ян**

Thyme herba

Антисептик, бактерицид, проти кашлю

- **Валеріана**

Valeriana spp.

Заспокійливе

Для вапорайзера AROMED HQ необхідна лише третина стандартної дози, оскільки випаровування відбувається без втрати активних речовин субстанцій. Вдихання випарів сприяє полегшенню симптомів, оскільки активні речовини швидше потрапляють у кров за допомогою легень, ніж при пероральному вживанні.

Будь ласка, проконсультуйтеся у ароматерапевта щодо лікарських рослин, які задовольнять ваші запити.

Вапорайзер AROMED HQ призначений лише для індивідуального використання. Будь-яке комерційне використання пристрою має бути узгоджено з виробником.

Важливі примітки

Вапорайзер AROMED HQ пропонує можливість вдихати повністю очищені випари субстанцій без смол. Звільнені чисті випаровування дають можливість отримати повне задоволення.

Система працює просто, але ефективно: м'яке випаровування із субстанції або рідин (використовуючи додаткову скляну ємність для рідин) можливе при вибраних температурах. Ви можете підбирати температуру з кроком 1 градус Цельсія.

Більш ніж 90% активних речовин випаровуються із субстанції та їх відразу ж можна вдихати. Це дозволяє досягти швидкого ефекту, який повторюватиметься і в майбутньому.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Порівняно зі згорянням субстанції, цей метод дозволяє дуже акуратно дозувати речовини. Ще одна перевага вапорайзера AROMED HQ у тому, що вдихати випари можна частіше, ніж курити.

Сенсація чистоти та ефективності

Чисте гаряче повітря та водяний фільтр перешкоджає проникненню різних частинок у бронхіальну систему, що гарантує здорові інгаляції. Необхідна лише третина стандартної дози субстанції при використанні вапорайзера AROMED HQ, причому ефект залишається тим же або навіть може бути кращим.

Точність та легкість: вибір правильної температури

- Для перемикання між відображенням температури в градусах Цельсія або Фаренгейта натисніть та утримуйте кнопки «+» та «-» протягом трьох секунд.
- Якщо субстанція стала темно-коричневою під час вдихання випарів, то температура однозначно дуже висока! Натискайте кнопку «-», щоб знизити температуру. Наприкінці вдихання випарів субстанція має бути світло-коричневою!
- Візьміть до уваги, що, якщо ви вдихаєте швидко і різко, температура нагрівання повинна бути більшою за температуру, при якій ви вдихаєте повільно. Середнє значення вдихів Середнє значення вдихів дорівнює трьом літрам повітря за п'ять секунд.
- Нагрівальним елементом є галогенна лампа без ультрафіолетового світла, що розжарюється для створення тепла. Коли вона розташована над субстанцією, нагрівання не відбувається без вдихання.

При вдиху лампа розжарюється та знову нагріває субстанцію до необхідної температури. Це дозволяє вам наповнювати вапорайзер такою кількістю субстанції, яку можна випарувати та вдихнути з інтервалами.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Заміна галогенової лампи та запобіжника

- Звичайну галогенову лампу (роз'єм GY 6.35, максимум 50 Вт, без ультрафіолетового світла) можна замінити, коли вона перегорить (це станеться після 1000 годин безперервного використання). Від'єднайте пристрій від мережі та відгвинтіть скло з головки вапорайзера, добре утримуючи її. Не торкайтеся руками лампи, використовуйте тканину або рукавички. При відгвинчуванні скла слідкуйте за тим, щоб термоелемент (тонкий провід, що йде до гнізда лампи) залишався на місці!
- Запобіжник (2 А) знаходиться в блоці живлення. Якщо знадобиться його заміна, змінійте на запобіжник з такими самими характеристиками.

Важливо!

- Для того, щоб запобігти поломці та несправності пристрою, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте разом з вапорайзером AROMED HQ для подальшого звернення до неї.
- Не залишайте вапорайзер AROMED HQ, коли він працює. Ніколи не залишайте без нагляду пристрій, якщо він увімкнений! Якщо ви не користуєтесь вапорайзером, відключіть його від мережі!
- Ніколи не торкайтеся нагрітих частин вапорайзера AROMED HQ голими руками. Гарячими стають ємність для субстанцій та нагрівальний елемент під час використання пристрою та відразу після його використання. Поводьтеся з ними так, як ви звертаєтесь з паяльником або праскою!
- Скляні частини пристрою виготовлені з боросилікатного скла. Гарантія на ці частини не надається.
- Вапорайзер AROMED HQ може бути розкритий або відремонтований лише компанією виробником! В іншому випадку гарантія не дійсна! Уточнюйте деталі постачальника.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

- Гарантія не дійсна, якщо з вапорайзером AROMED HQ зверталися недбало або він був використаний іншим способом ніж це описано в інструкції.

Вдихніть саму природу – використання пурпурової шавлії у вапорайзері AROMED HQ

Цей приклад показує використання пурпурової шавлії (*salvia sclarea*) у вапорайзері AROMED HQ. Пурпурна шавлія також його види шавлія звичайна і шавлія провісників (вид, який використовується в народній медицині індіанців латинської Америки) є лікарською рослиною широкого застосування. Його приймають при бронхіті та інших респіраторних захворюваннях, а також для позбавлення від спазмів. Також він вказаний як засіб покращує настрої в аюрведичній (азіатській) терапії.

Пурпурна шавлія також включає сильні бактерицидні та антисептичні речовини, які можна вдихати за допомогою вапорайзера AROMED HQ.

Наповніть ємність для субстанцій пурпуровою шавлією в об'ємі ½ чайної ложки та встановіть температуру 130 градусів Цельсія. Температура випаровування залежить від вологості субстанції. Чим вологіша субстанція, тим вище необхідно встановлювати температуру.

Переконайтеся, що між нагрівальним елементом та субстанцією є щонайменше 5 міліметрів!

Як тільки червона точка у лівому верхньому куті дисплея почне блимати, це означає, що вапорайзер AROMED HQ готовий до використання. Повільно та глибоко вдихайте випаровування. Затримуйте дихання якнайдовше. Коли ви видихнете, ви відчуєте чистий тонкий аромат. Якщо ви хочете використовувати вапорайзер AROMED HQ у компанії, наприклад, для ароматерапії, ми рекомендуємо використовувати кілька силіконових мундштуків для силіконової трубки.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Терапія пурпурою шавлією була застосована до пацієнтів із сильним кашлем та проблемами з бронхіальною системою, а також до пацієнтів жіночої статі із хворобливою менструацією. У пацієнтів спостерігалось миттєве полегшення симптомів. Пацієнтів з астмою вдало лікували сумішшю з конюшини та мати-й-мачухи.

У випадках спазмів при менструації пацієнткам давали суміш з вербової кори (5 частин пурпурою шавлії і одна частина подрібненої вербової кори), яка приносила полегшення протягом декількох хвилин. Суміші з рослин можна випаровувати лише в тому випадку, якщо їхня температура випаровування різниться максимум на 25 градусів Цельсія. В іншому випадку, ми рекомендуємо випаровувати рослини по черзі за їх температур випаровування.

Хоча потік повітря відкалібрований під 3 літри за п'ять секунд, чим сильнішою буде затяжка, тим нижчою буде температура. Чим плавнішою буде затяжка, тим вищою буде температура.

Постачання запасних частин

Будь ласка, зверніться за електронною адресою info@aromedvaporizer.de

Акcesуари для вапорайзера AROMED HQ

Ємність для рідин

Для випарювання будь-яких рідин.

Аромонасадка

Вапорайзер AROMED HQ перетворюється на пристрій для фумігації кімнати.

Додаткові мундштуки

Вони вам знадобляться, якщо вапорайзером AROMED HQ користуватимуться кілька людей.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Технічні характеристики

Діапазон температур: від 60 до 235 градусів Цельсія з кроком в один градус

Живлення: 90 – 250 В

Частота: 50 – 60 Гц

Максимальна потужність, що генерується: 65 Вт

Мікропроцесор: NEC

Директива EMV 89/336/EWG, EMVG

EN 61000-6-3 + EN 6100-6-1

Директива про низьку напругу: 72/23/EWG

У пристрій можуть бути внесені зміни відповідно до останніх технічних стандартів, а також для покращення роботи пристрою.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua